


GUIDE D'UTILISATION SIMPLIFIÉ

Pompe de nutrition entérale Flocare® Infinity™ II

PRÉCAUTIONS D'USAGE

- Avant chaque utilisation, vérifier la propreté et l'intégrité de la pompe (vérifier l'absence de fissures, rayures etc. principalement sur la zone transparente où vient se positionner la cassette).
- Ne pas utiliser la pompe si elle est endommagée ou dysfonctionne. Le cas échéant, la pompe doit être vérifiée par un personnel technique formé à la maintenance de la pompe avant toute nouvelle utilisation.
- Les patients bénéficiant d'une pompe doivent être régulièrement suivis par un professionnel de santé.
- Pour rappel, une maintenance préventive de la pompe doit être réalisée tous les deux ans ainsi qu'un contrôle entre deux patients lorsqu'une pompe passe d'un patient à un autre patient.

INSERTION DE LA TUBULURE

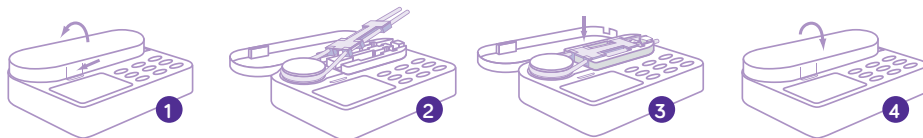

PROGRAMMATION

- ON/OFF** > Appuyer sur cette touche pendant 2 secondes pour allumer (ou éteindre) la pompe.
- EFFACER** > Appuyer sur cette touche pour effacer la mémoire de la pompe (débit programmé et volume administré)
- PURGER** > Appuyer sur cette touche pendant 2 secondes pour purger automatiquement la tubulure.
> Connecter la tubulure à la sonde et débiter la nutrition.

Nutrition en continu

DÉBIT > **+** 400 mL/h > **START/STOP**
- 1 mL/h

Nutrition par dose

DÉBIT > **+** 400 mL/h > **DOSE-VOL** > **+** 4000 mL > **START/STOP**
- 1 mL/h > **-** 1 mL

- INFO** > Appuyer sur cette touche pour afficher le volume total administré.



RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

NO TUBULURE	> Absence de tubulure ou tubulure mal insérée dans la pompe. > Arrêter l'alarme en pressant la touche START/STOP > Insérer la tubulure Flocare® Infinity™ selon les instructions d'utilisation > Redémarrer la pompe > Si nécessaire, nettoyer les capteurs de pression.
PAUSE	> Pompe en mode pause depuis plus de 3 minutes > Prolonger le mode pause de 3 minutes en pressant la touche START/STOP > Programmer la pompe et redémarrer en pressant la touche START/STOP .
FIN DOSE	> Le volume programmé a été administré > Éteindre la pompe en pressant  pendant 2 secondes ou effacer la mémoire en pressant EFFACER .
PROG	> Aucun débit n'est programmé > S'assurer qu'un débit correct soit programmé.
PORTE	> La porte n'est pas fermée correctement > S'assurer de la bonne fermeture de la porte avant de mettre en route la nutrition.
AIR	> Poche vide > Remplacer la poche de nutrition vide. > Tubulure vide au démarrage de l'administration de la nutrition > Purger la tubulure en appuyant 2 secondes sur la touche PURGER > Si nécessaire, contrôler le bon positionnement de la tubulure dans la pompe et nettoyer le détecteur d'air. Vérifier l'absence de fissures au niveau du capteur.
BATT la pompe ne s'arrête pas	> Capacité batterie trop faible > Charger la batterie pendant 6 heures sur secteur. Pendant le chargement, la pompe peut être utilisée.
BATTERIE CLIGNOTANTE	> Dysfonctionnement de la batterie > Envoi de la pompe au service de maintenance.
OCC IN OCC OUT	> Détection d'une occlusion entre la poche et la pompe (IN) ou entre la pompe et le patient (OUT) > Arrêter l'alarme en pressant START/STOP puis s'assurer de la perméabilité de la tubulure et/ou de la sonde (pas de plicature, ni d'obstruction) > Réinsérer la tubulure et redémarrer la pompe > Vérifier l'absence de fissures et si nécessaire, nettoyer le capteur de pression.
OCC OUT (répétée)	> Calibration de la tubulure non terminée > Arrêter l'alarme en pressant START/STOP > Démarrer et arrêter la pompe à quelques secondes d'intervalle en pressant START/STOP (s'assurer que l'alarme OCC OUT ne se déclenche pas) > Retirer la tubulure de la pompe puis la réinsérer > Redémarrer la pompe.
VERROU	> Paramètres d'administration bloqués par un personnel de santé autorisé.
ER01 - ER99	> Détection d'une erreur électronique > Éteindre la pompe et s'assurer que la porte est bien fermée. Redémarrer > Si le problème persiste : envoi de la pompe au service de maintenance.
ER40	> Un appui long a été fait sur la touche START/STOP sans attendre l'autocalibrage de la pompe > Éteindre la pompe en pressant  , attendre quelques secondes, rallumer la pompe et attendre que l'autocalibrage se fasse.
PAS DE SYMBOLE PRISE (alors que la pompe est branchée)	> Brancher le chargeur sur une autre prise > Si le symbole ne s'affiche pas, contacter votre professionnel de santé pour changer le chargeur.

En complément du présent guide d'utilisation simplifié, nous vous recommandons de vous reporter au manuel d'instruction d'utilisation de la pompe Flocare® Infinity™.