

Pompe Kangaroo OMNI™


Mode Nutrition & Hydratation programmées

1

Une fois la pompe allumée, l'écran Paramètres s'affiche.

Option 1 : vous pouvez **appuyer sur Conserver réglages** pour utiliser les paramètres de la précédente session d'alimentation. Ils sont automatiquement enregistrés.

Option 2 : vous pouvez **appuyer sur Effacer réglages** si vous souhaitez effacer les paramètres de la précédente alimentation.

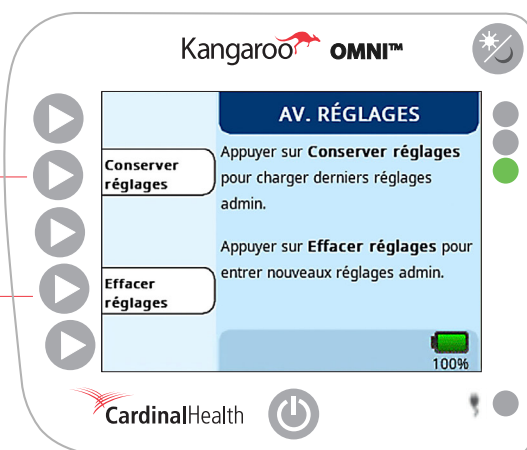

2


Après avoir sélectionné le kit d'alimentation, suivre les instructions animées sur l'écran Chargement seul du kit pour charger la cassette sur la pompe. Un "click" retentit lorsque la cassette est correctement installée.

La partie supérieure du volume initial des fluides entéraux doit être située à 25,4 cm (10 pouces) au-dessus de la partie supérieure de la pompe d'alimentation entérale Kangaroo OMNI™.

Utilisez uniquement les kits d'alimentation Kangaroo OMNI™ agréés avec la pompe d'alimentation entérale Kangaroo OMNI™.



L'écran Chargement du kit confirme que la pompe a bien identifié le kit d'alimentation. Depuis cet écran, vous pouvez ajuster les paramètres de nutrition et d'hydratation ainsi qu'**Amorcer**.

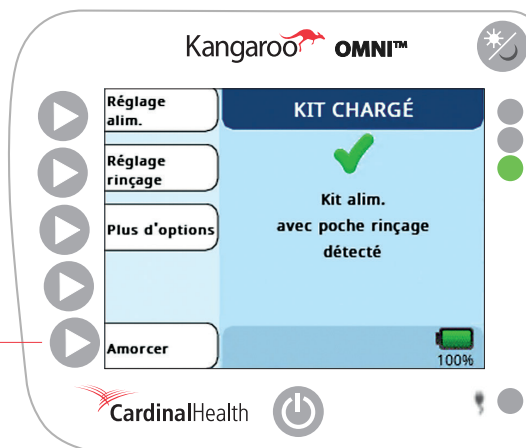


3 AMORCER

Il existe deux options d'amorçage.


Amorçage automatique : l'amorçage de la sonde est automatiquement effectué.

Amorçage manuel : vous devez maintenir enfoncé un bouton de la pompe jusqu'à ce que le liquide atteigne l'extrémité de la tubulure.

Note : lors de l'amorçage, il est important que le patient ne soit PAS connecté à la pompe.

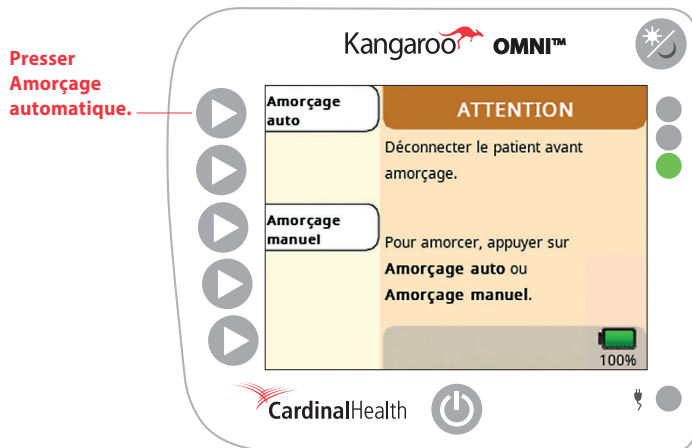


Lorsque le fluide a atteint l'extrémité de la tubulure, appuyer sur Terminé.

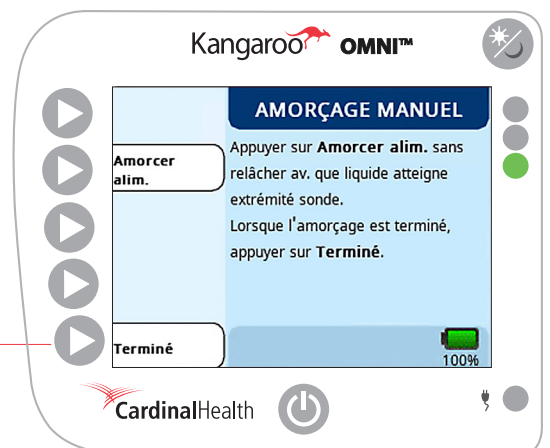

4

Réglage de l'alimentation


Appuyer sur Réglage du débit pour ajuster la vitesse à laquelle vous souhaitez que la pompe administre l'alimentation.

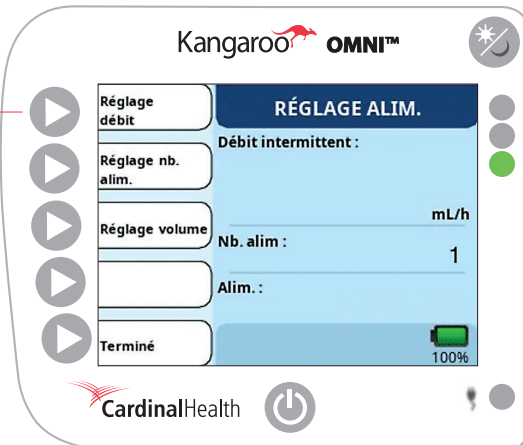

4a

Appuyer sur les boutons + ou - pour augmenter ou diminuer le débit souhaité.

Appuyer sur OK pour revenir à l'écran précédent.

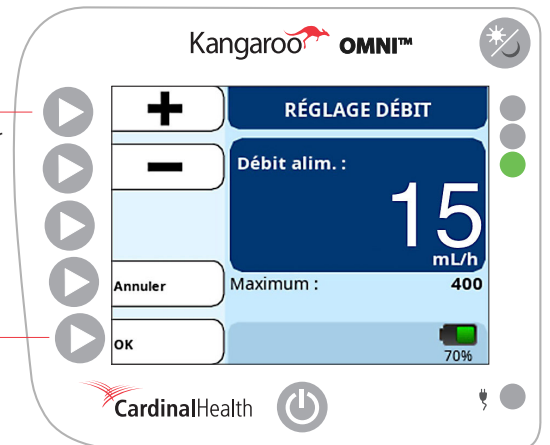


4b

La pompe est préréglée sur 1 = le volume d'alimentation est administré en 1 fois.

Si et seulement si, vous souhaitez administrer ce volume avec des pauses et des reprises automatiques, dans ce cas entrez le nombre d'alimentation souhaité : 2/3/4...


Appuyer sur OK pour enregistrer et revenir à l'écran précédent.

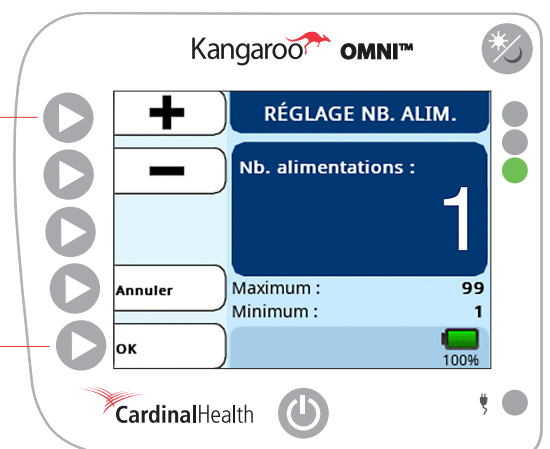


4c

Appuyer sur les boutons + et - pour régler le volume d'alimentation à administrer.

Appuyer sur OK pour enregistrer et revenir à l'écran précédent.

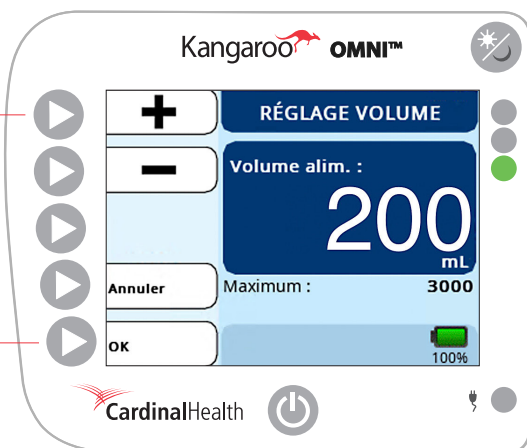


Appuyer sur Terminé pour revenir au menu précédent.

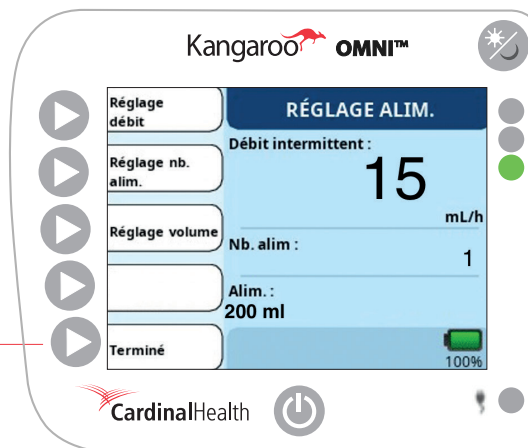


5

Réglage de l'hydratation/rinçage

Appuyer sur Réglage rinçage si vous avez sélectionné un kit/une cassette d'alimentation avec option de rinçage (hydratation).

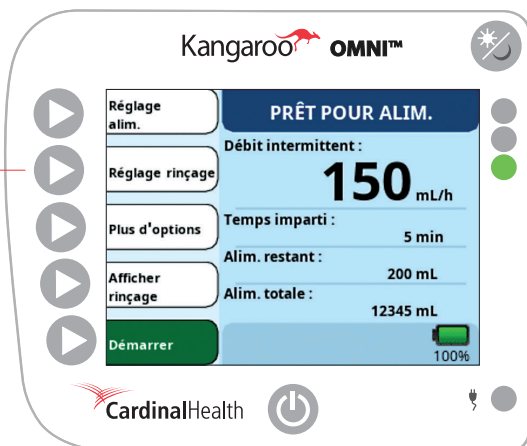


Appuyer sur Réglage volume

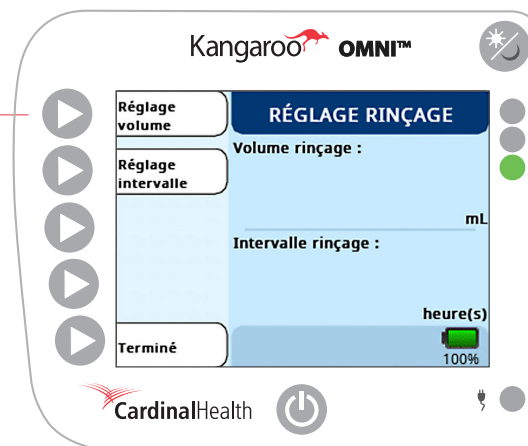

5a

Appuyer sur les boutons + ou - pour augmenter ou diminuer le volume d'eau. Attention le volume à programmer n'est pas le volume total mais le volume par flush.


Appuyer sur OK pour revenir à l'écran précédent.

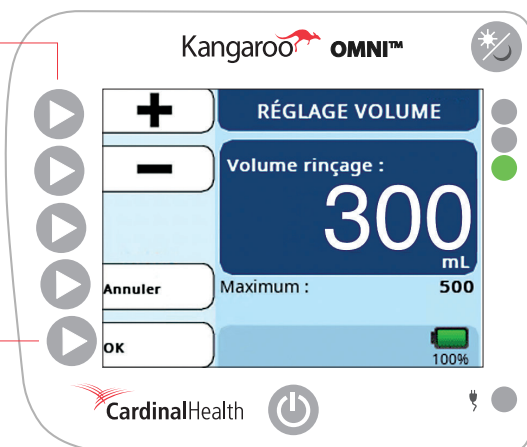


5b

Appuyer sur les boutons + et - pour augmenter ou diminuer l'intervalle de rinçage.

Une fois l'intervalle souhaité, sélectionné appuyer sur OK pour revenir à l'écran précédent.

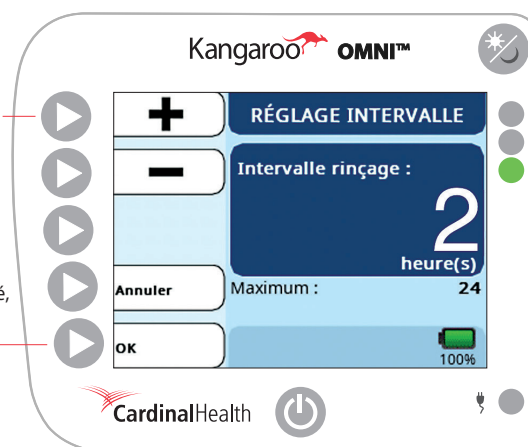


Appuyer sur Terminé

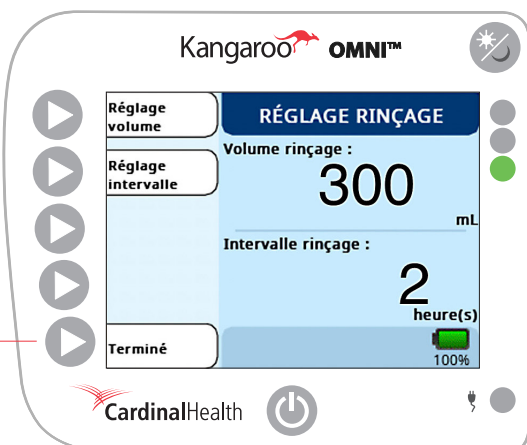

5c

La pompe est prête

Si vous êtes satisfaits des valeurs programmées appuyer sur Démarrer pour lancer la pompe

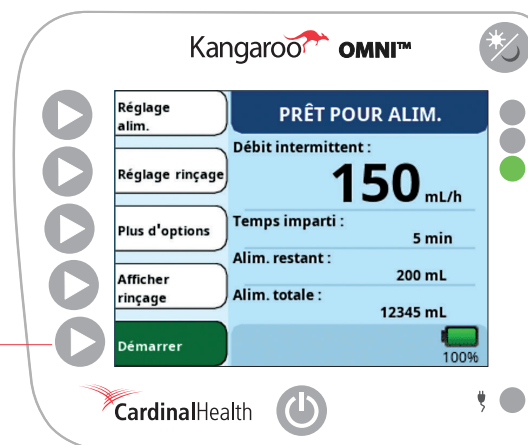



A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE UNIQUEMENT

La pompe Kangaroo™ OMNI est un dispositif médical de classe IIa, fabricant légal Cardinal Health 200 LLC, CE N°2797. Kangaroo™ est conçue pour administrer aux patients une alimentation par voie entérale en continu ou intermittente. Ces dispositifs sont dotés d'une fonction de rinçage lorsqu'elle est utilisée avec des tubulures d'alimentation et de rinçage pour pompes Kangaroo™ OMNI. IMPORTANT : veuillez vous reporter à la notice des produits pour obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des indications, contre-indications, avertissements, précautions et des informations indispensables à son bon usage.

© 2026 Cardinal Health. Tous droits réservés. CARDINAL HEALTH, le LOGO Cardinal Health, KANGAROO et KANGAROO OMNI sont des marques commerciales de Cardinal Health et peuvent être déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Crédit photos Cardinal Health. Cardinal Health France 506 SAS, 41 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux, RCS Nanterre 812 365 609. Brochure N°3NDL26-4105958 (01/2026).

